



BANDA DESCARTÁVEL PRÉ-CORTADA XACTTRACE™

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Descrição

A banda de estiramento XactTrace™ é constituída por um fio de cobre e pré-cortada para tamanhos padrão: pediátrico, pequeno, médio e grande. Estas bandas possuem terminais de pressão pré-acoplados para uma configuração rápida e fácil. A banda descartável pré-cortada é projetada e validada para utilização com dispositivos Embla®*.

A mesma tecnologia RIP de alta qualidade, com a qual o consumidor está acostumado nas nossas bandas XactTrace™ reutilizáveis, continua a fornecer excelentes dados do paciente.

Limpeza e Eliminação

As bandas não precisam de ser limpas pois não são reutilizáveis, devem ser descartadas após a sua utilização. Não utilize duas fivelas do mesmo tipo num registo, cada fivela opera a uma frequência única e utilizar o mesmo tipo num registo poderá causar interferência.

Avisos


As bandas não devem estar demasiado apertadas à volta do paciente, uma vez que lhe vai causar desconforto. Para evitar que a banda escorregue durante o estudo, estas devem ser fixadas com fita adesiva de uso médico.

Armazenamento

As bandas devem ser armazenadas em local seco.



Embla ■ 1 Hines Road, Suite 202 ■ Kanata, ON K2K 3C7 ■ Canada

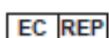

Natus Europe GmbH ■ Robert-Koch-Str. 1 ■ 82152 Planegg ■ Germany

* Compatível com o sistema Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embla Titanium, Embla MPR (todos os modelos) e Embla Gold