


SleepSense®

The Sensor Solutions Company

Cânula para monitorização da pressão nasal e oral de 60 cm para adultos

Cânula nasal de 60 cm e tubo com conexão Luer macho.
Uso único. Não esterilizar

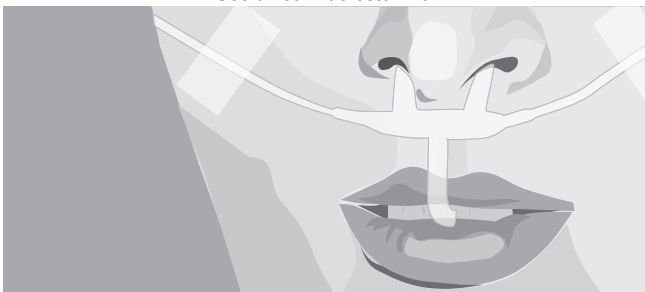

Atenção, consulte o manual de utilização



Manter seco



Proteja da luz solar



Marcação CE de conformidade



Não contém látex de borracha natural



Sem BPA



Sem DEHP



Não reutilizar



Prazo de validade:

YYYY-MM



00000000

15802-2*

Item N15802-2-PORTO- ver. 1.0 [Side A]



S.L.P. Ltd.

62 Mordechai Anilevitz St.
Tel Aviv, 6706016,
ISRAEL
Tel: +972 3 6870640
Fax: +972 3 5371282

S.L.P. Inc.

2511 Technology Dr., Suite 112
Elgin, IL 60124, USA
Tel: +1 (630) 513 7479
Fax: +1 (630) 513 8478
E-mail: info@sleepsense.com

EC REF

Arazy Group GmbH

The Squire 12,
Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Germany

www.sleepsense.com

Toll-free(U.S.): 888-slp-sens (757 7367)

Made in China.

Instruções de utilização

Posicione a cânula no rosto, inserindo as pontas nas cavidades nasais. Pode aparar e dobrar a ponta oral para colocar a ponta à frente da boca.

Indicações de utilização:

Os sensores SleepSense fornecem uma medida qualitativa de sons, esforço respiratório, fluxo, posição do corpo ou movimentos dos membros para ser registado num sistema de aquisição de dados aprovado. Podem ser usados em crianças e adultos que estão a ser monitorizados durante o estudo de distúrbios do sono num laboratório do sono ou em casa do doente.



Avisos e Precauções

- **Atenção:** a lei federal dos EUA restringe a venda, a distribuição e o uso deste dispositivo por ou sob prescrição médica.
- Os sensores SleepSense são apenas para uso profissional.
- Os sensores SleepSense podem ser usados apenas em conjunto com um sistema de registo aprovado.
- Os sensores SleepSense estão destinados a serem utilizados em pele saudável.
- Suspenda a utilização se o sensor mostrar sinais de desgaste, dano ou metal exposto.