

CÂNULAS NASAIS PARA DIAGNÓSTICO DO SONO

As cânulas nasais CNSAC® são fabricadas em PVC médico macio e compatível com a pele. As pontas nasais macias proporcionam o máximo conforto, especialmente para uma utilização prolongada. Toda a nossa gama de cânulas nasais para diagnóstico vem equipada com uma ligação Luer-Lock ou NOX, que oferece uma ligação universalmente segura ao seu dispositivo. As nossas cânulas nasais são utilizadas para estudos do sono (PSG, PG, Rastreo do Sono, HST, etc.) para medir o fluxo respiratório, ronco e detetar apneias e hipopneias do sono.

As principais características das cânulas nasais CNSAC® podem ser resumidas como:

- Design inovador
- Fácil aplicação
- Garante maior conforto ao doente
- Ligação Luer-Lock universal ou NOX
- Compatível com a maioria dos sistemas de PSG (Natus, Löwenstein, Somnomedics, Nihon Kohden, NOX, etc.)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Introduza as pontas nasais nas narinas, passando os dois tubos sobre as orelhas e por baixo do queixo.
2. Ligue o tubo da cânula nasal ao dispositivo de PSG.

CUIDADO

- Uso único
- Não armazenar sob luz solar direta
- Armazenar em local seco
- Não utilizar se a embalagem da cânula nasal estiver danificada
- Utilizar apenas por profissionais médicos treinados e qualificados