

Portuguese

Suporte para eletrodo de agulha concêntrica descartável Dantec™ DCN

Instruções para uso
Número do catálogo 9013C0014

Contém um cabo para a agulha concêntrica descartável Dantec™ DCN. O sistema oferece uma conexão com orientação livre e um cabo blindado leve e flexível para facilidade de uso.

Os eletrodos de agulhas concêntricas descartáveis Dantec™ DCN (disponíveis em caixas com 25 unidades) que podem ser usadas com este suporte são:

Número do pedido	Comprimento da agulha	Diâmetro da agulha	Área de gravação	Cur do cubo
9013S0012	25mm	0.30mm	0.02mm ²	Laranja
9013S0022	25mm	0.46mm	0.07mm ²	Verde
9013S0032	37mm	0.46mm	0.07mm ²	Azul
9013S0042	50mm	0.46mm	0.07mm ²	Vermelho
9013S0052	75mm	0.64mm	0.07mm ²	Amarelo

Instruções de limpeza



O suporte da agulha deve ser limpo com um tecido embebido em álcool após o uso.
Não coloque o suporte da agulha em autoclave.

Símbolo	Português
REF	Número de catálogo
LOT	Número de rastreabilidade
	Ver instruções de uso
Rx Only	Em virtude de leis federais dos EUA, este aparelho somente pode ser vendido e utilizado por determinação médica.

Chinese

一次性 Dantec™ DCN 同轴针形电极固定器

使用说明
产品目录编号 9013C0014

附件为 Dantec™ DCN 一次性同轴针形电极的线缆。系统无需指导即可实现连接，并提供轻量化的柔性屏蔽线缆以便于使用。

适用于此固定器的 Dantec™ DCN 一次性同轴针形电极（一盒 25 根）有：

订单号	针长度	针直径	记录区域	衬套颜色
9013S0012	25mm	0.30mm	0.02mm ²	橙色
9013S0022	25mm	0.46mm	0.07mm ²	绿色
9013S0032	37mm	0.46mm	0.07mm ²	蓝色
9013S0042	50mm	0.46mm	0.07mm ²	红色
9013S0052	75mm	0.64mm	0.07mm ²	黄色

清洁说明



使用之后，应使用酒精棉擦拭针形电极固定器。
切勿对针形电极固定器进行高压消毒。

符号	中国
REF	产品目录编号
LOT	查询号
	参阅使用说明
Rx Only	美国联邦法律规定此设备只能销售给获得许可的医疗从业人员或凭他们的订单出售。

natus.
neurology

Holder for Dantec™ DCN Disposable Concentric Needle Electrode Instructions for use



CE

Made in Slovakia 014029 01