

SleepSense®

The Sensor Solution Company



Cânula pediátrica de 210 cm de monitorização da pressão nasal

Com tubo de 210 cm, com ligação luer macho. Utilização única. Não esterilizar.

	Cuidado, consulte as instruções para uso		Manter ao abrigo da luz solar		Manter seco				
	Limite de temperatura de armazenamento -10°C - 40°C		Não reutilizar		Sem BPA				
	Limite de humidade de armazenamento 0% - 80%		Marcação CE de conformidade		Sem DEHP				
	Não fabricado com látex de borracha natural		Usar antes de	YYYY / MM	<table><tr><td>LOT</td><td>000000000</td></tr><tr><td>REF</td><td>15804</td></tr></table>	LOT	000000000	REF	15804
LOT	000000000								
REF	15804								

Item N15805-FT-C ver. 2.5 [Side A]

S.L.P. Ltd. 62 Mordechai Anilevitz St. Tel-Aviv, 6706016, Israel Tel: +972 3 6870640 Fax: +972 3 5371282	S.L.P. Inc. 2511 Technology Dr., Suite 112 Elgin, IL 60124, USA Tel: +1 (630) 513 7479 Fax: +1 (630) 513 8478 E-mail: info@sleepsense.com	EC REP Arazy Group GmbH The Squire 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany	CH REP Arazy Group Switzerland GmbH Bruderholzallee 53, 4059 Basel, Switzerland	UK CA UK Responsible Person: Medes Ltd. 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Herts, Radlett D77AR, England, United Kingdom
www.sleepsense.com		Toll-free(U.S.): 888-slp-sens (757 7367)		

Made in China.

Posicionar a cânula no rosto, introduzindo as pontas da cânula nas narinas de acordo com a figura.

Indicações de utilização

Os sensores de laboratório do sono SleepSense fornecem uma medição qualitativa de sons, esforço respiratório, fluxo, posição do corpo ou movimentos dos membros, para registo num sistema aprovado de aquisição de dados. Os sensores destinam-se a ser utilizados em pacientes, crianças e adultos, que são rastreados durante estudos de distúrbios do sono num laboratório do sono ou no domicílio do paciente.

Avisos e precauções

- Atenção: de acordo com a legislação federal dos EUA, a venda, distribuição e utilização deste dispositivo pode ser feita apenas por um médico ou por prescrição médica.
- Os sensores SleepSense destinam-se apenas a uso profissional.
- Os sensores SleepSense só podem ser usados juntamente com um sistema de registo aprovado.
- Os sensores SleepSense destinam-se a ser utilizados apenas em pele saudável.
- Interrompa o uso se o sensor apresentar sinais de desgaste, danos ou metal exposto.