

SleepSense®

The Sensor Solutions Company

ThermoCan™ Cânula Térmica para criança, 210 cm

Luer simples



Item N15816 - ver.3.1 [Side A]



Use by:
YYYY / MM



LOT 00000000
REF 15816

S.L.P. Ltd.

62 Mordechai Anilevitz St.
Tel-Aviv, 6706016, Israel
Tel: +972 3 6870640
Fax: +972 3 5371282

S.L.P. Inc.

2511 Technology Dr.,
Suite 112 Elgin, IL 60124, USA
Tel: +1 (630) 513 7479
Fax: +1 (630) 513 8478
E-mail: info@sleepsense.com

EC REP

Arazy Group GmbH

The Squire 12,
Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Germany

CH REP

Arazy Group Switzerland GmbH

Bruderholzallee 53, 4059
Basel, Switzerland

UK

CA

UK Responsible Person:

Medes Ltd.

5 Beaumont Gate,
Shenley Hill, Herts,
Radlett D77AR, England,
United Kingdom

Made in China.

www.sleepsense.com

Toll-free(U.S.): 888-slp-sens (757 7367)

Instruções de utilização

- Ligar a cânula térmica usando o cabo de interface pediátrico Sleepsense, inserindo os tampões metálicos em cada lado da peça nasal. *(figura 1)*.
- Posicionar a cânula no rosto, inserindo as pontas nasais nas narinas. *(figura 2)*.
- Ligar o cabo de interface ao sistema PSG.
- Peça ao paciente para respirar pelo nariz e pela boca e assegure-se que são registados sinais claros.



Indicações de utilização

Os sensores de laboratório do sono SleepSense fornecem uma medição qualitativa de sons, esforço respiratório, fluxo, posição do corpo ou movimentos dos membros, para registo num sistema aprovado de aquisição de dados. Os sensores destinam-se a ser utilizados em pacientes, crianças e adultos, que são rastreados durante estudos de distúrbios do sono num laboratório do sono ou no domicílio do paciente.

Avisos e precauções

- **Atenção:** de acordo com a legislação federal dos EUA, a venda, distribuição e utilização deste dispositivo pode ser feita apenas por um médico ou por prescrição médica.
- Os sensores SleepSense destinam-se apenas a uso profissional.
- Os sensores SleepSense só podem ser usados juntamente com um sistema de registo aprovado.
- Interrompa o uso se o sensor apresentar sinais de desgaste, danos ou metal exposto.
- Os sensores SleepSense destinam-se a ser utilizados apenas em pele saudável.