

## CÂNULAS NASAIS PARA DIAGNÓSTICO DO SONO

As cânulas nasais CNSAC® são fabricadas em PVC médico macio e compatível com a pele. As pontas nasais macias proporcionam o máximo conforto, especialmente para uma utilização prolongada. Toda a nossa gama de cânulas nasais para diagnóstico vem equipada com uma ligação Luer-Lock, que oferece uma ligação universalmente segura ao seu dispositivo. As nossas cânulas nasais são utilizadas para estudos do sono (PSG, PG, Rastreo do Sono, HST, etc.) para medir o fluxo respiratório, ronco e detetar apneias e hipopneias do sono.

As principais características das cânulas nasais CNSAC® podem ser resumidas como:

- Design inovador
- Fácil aplicação
- Garante maior conforto ao doente
- Ligação Luer-Lock universal
- Compatível com a maioria dos sistemas de PSG (Natus, Löwenstein, Somnomedics, Nihon Kohden, etc.)

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Introduza as pontas nasais nas narinas, passando os dois tubos sobre as orelhas e por baixo do queixo.
2. Ligue o tubo da cânula nasal ao dispositivo de PSG.

### CUIDADO

- Uso único
- Não armazenar sob luz solar direta
- Armazenar em local seco
- Não utilizar se a embalagem da cânula nasal estiver danificada
- Utilizar apenas por profissionais médicos treinados e qualificados