

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL PRODUCTO

Información/instrucciones detalladas sobre el producto:

- Requiere cable.
A) No usar estos electrodos para la estimulación cualquiera que sea el tipo.
B) Los electrodos se deben fijar y/o aplicar usando una pasta conductora para EEG o colodion en combinación con un gel conductor indicado para uso médico.
C) El gel conductor se introduce mediante una jeringa, con una aguja desafiada, a través del orificio en la parte superior de los electrodos.
D) Leer las instrucciones del fabricante sobre la preparación y eliminación del colodion, gel y pasta antes y después de la aplicación.
E) El contacto con metales impuros, algunos geles para preparación de la piel y geles conductores puede afectar la superficie clorada de las cucharillas de los electrodos.
F) Se debe evitar la presencia de agua y electro-gel entre la placa/cinta de fieltro y los electrodos de registro o estimulación y eliminar antes de la aplicación.
G) Se debe evitar la presencia de agua y electro-gel entre los polos y eliminar antes de la aplicación.
H) El fieltro se debe sumergir en una solución salina (exceptuando un mínimo de 2 cm de la cinta de fieltro donde se fija el cable) durante unos minutos, tras lo cual se debe aplicar una pequeña cantidad de electro-gel.
I) Los electrodos de superficie de acero se deben humedecer con electro-gel antes y durante la aplicación.
J) Tenga en cuenta la codificación de los electrodos para la polaridad. Un punto rojo, moldeado en el estimulador, indica el ánodo.
K) Tenga en cuenta el color de los cables para la polaridad; rojo indica el ánodo.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO
PRODUTOS GERAIS REUTILIZÁVEIS

Informações importantes sobre o produto:

Para ser usado apenas por pessoal treinado e qualificado. Não conecte os eletrodos diretamente a uma fonte de energia elétrica. A aplicação dos eletrodos deve ser supervisionada por um médico.

Limpeza e esterilização:

Para mais detalhes, veja as Recomendações de Limpeza.

Informações detalhadas sobre o produto:

Veja a próxima página para obter informações / instruções detalhadas sobre o produto:	Instruções aplicáveis:
Eletrodos de agulha concêntricas e únicas	A, B
Eletrodos nasofaríngeos	B
Eletrodos de agulha monopolares e subdérmicos	B
Eletrodos copo e ouvido	B, C, D, E, F
Eletrodos de aterramento e de placa de aterramento	B, G, I, J
Eletrodos de superfície	G, J
Eletrodos bipolares de fieltro e de barra	H, I, J, K
Eletrodos pequenos de estimulação e de anel	H, J, L

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO
PRODUTOS GERAIS REUTILIZÁVEIS

Informação/instruções detalhadas sobre el producto:

- A) Cabo necessário.
B) Não use estes eletrodos para qualquer tipo de estimulação.
C) Os eletrodos devem ser fixados e/ou aplicadas pelo uso de uma pasta condutiva de EEG ou ou um conjunto em combinação com um gel condutor adequado para uso médico.
D) O gel condutor é inserido através de uma seringa com uma agulha rombuda através do orifício existente na parte superior dos eletrodos.
E) Leia as instruções dos fabricantes sobre a preparação e a remoção do colódio molhado, gel e pasta antes e após a aplicação.
F) Contato com metais impuros, com algumas preparação de pele e tipos de gel condutivo clorados pode afetar a superfície dos copos de eletrodo.
G) Água e gel de eletrólito entre a cinta/placa de fieltro e os eletrodos de gravação ou de estímulo devem ser evitados e removidos antes da aplicação.
H) Água e gel de eletrólito entre os polos devem ser evitados e removidos antes da aplicação.
I) O fieltro deve ser embebido em uma solução salina normal (deixando secar um espaço mínimo de 2cm da fita de fieltro para a fixação do cabo) por alguns minutos e, em seguida, uma pequena quantidade de gel de eletrólito deve ser esfregada.
J) Os eletrodos com revestimento de aço devem ser umedecidos por um gel de eletrólito antes e durante a aplicação.
K) Observe a codificação de polaridade dos eletrodos. Um ponto vermelho, moldado no estimulador, indica o ânodo.
L) Observe a cor do cabo para a polaridade; vermelho indica que o ânodo.