

- Upute za uporabu:**
 - Pripreme pripreme pripreme kožu pazeti da je mjesto čisto i suho.
 - Pripreme koži alkoholem ili abrazivnim sredstvom.
 - Staviti mali količinu vodjovodja na željeno područje.
 - Postavite elektrodu na kožu pacijenta pazeći da ravnomjerno priopiti prve vijova elektrodu za stimulaciju.
 - Za držanje elektrodu na mjestu može se koristiti vjetrok'o ili ljepljiva traka.
 - Ljepljivu elektrodu na pacijenta koristiti odgovarajući priključak.
 - Provjerite da li se nakon priključivanja prenose jači, snažni signali.
- Upute za čišćenje:**
 - Čistite kometirajućim ubrusima poput CanWipes® i Sani-Cloth® i nakon svake aplikacije vjetrok'o.
 - Obrišite dio k'opom koji ne ostavlja k'aske i osušite na zraku.

Razumijevanje t'ijava opreza:

